

# Manuel d'utilisation MyEasyOptic : Interface Nidek

TOUTES VERSIONS

MyEasyOptic



## Manuel d'utilisation MyEasyOptic : Utilisation de l'interface Nidek

### I. Paramétrage dans MEO

Un paramétrage Nidek est disponible dans la section «Interfaces».

Les chemins d'accès aux répertoires d'échange avec les machines Nidek sont pré-remplis avec les valeurs, généralement par Nidek lors des installations.

*NB : Si ce chemin est différent, veuillez vous rapprocher du support Nidek pour qu'il vous communique les valeurs à renseigner.*

Il existe plusieurs configurations possibles : Réfracteur seul, réfracteur + Box, réfracteurs multiples, réfracteurs multiples + box.

Selon les cas, il convient de nommer le(s) réfracteur(s) présent(s) dans le magasin, et/ou de cocher la case « Présence d'une box ».

Paramètres + Menu > Paramètres

Magasin  
Client  
Mutuelles & SS  
Stock & Verre  
Documents  
Caisse  
Interfaces  
Opsysweb  
Activisu  
Nidek  
Export CRM  
SCOR  
Cofidis  
Zerosix  
EasyPlug  
Assistance

Répertoires de travail

Repertoire de lecture du réfracteur c:\NKBSimulator\in

Repertoire d'écriture du réfracteur c:\NKBSimulator\out

Présence d'une box Nidek

Nom des réfracteurs

	Libellé
RT01	

OK [Save] [Refresh]

## II. Utilisation

A l'utilisation, après avoir renseigné les verres, il ne reste qu'à cliquer sur le bouton bleu «Nidek».

Les données saisies dans MyEasyOptic seront automatiquement envoyées aux machines, évitant ainsi la perte de temps liée à la re-saisie, et les erreurs potentielles qui peuvent en découler.

Monture

2663 9410 KF-341 NEOPTIC KINTO Noir rouge 51 16 MMM 89,00

Oeil Droit

-2,00 1,00 0 Add. Ac. 70 Ø2 BBG OU

BBGR - ASPHEO 167 NMax UV 237,00

Suppléments  Verre teinté 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Oeil Gauche

-3,00 1,00 90 Add. Ac. 70 Ø2 BBG OU

BBGR - ASPHEO 167 NMax UV 237,00

Suppléments  Verre teinté 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

